



EZY-AS® è un applicatore universale, brevettato e molto pratico, concepito per coloro che hanno difficoltà nell'indossare calze compressive medicali a punta aperta o chiusa, bracciali con o senza guanto, oppure fasce tubolari, evitando interferenze con eventuali medicazioni.

EZY-AS® è disponibile in 3 misure, distinguibili dal colore. E' compatto, leggero, facilmente trasportabile, facilissimo da pulire, robusto e non arrugginisce. Si compra una volta sola e si usa a lungo, avendo cura di non esporlo a temperature superiori a 40°C e di non lasciarlo vicino a fonti di calore.

L'accessorio MANIGLIE è adatto per chi abbia limitata capacità di movimento.

EZY-AS® è la soluzione ideale per infermieri ed assistenti che devono applicare calze terapeutiche ed antiemboliche, soprattutto ai pazienti allettati.

# COME APPLICARE LA CALZA ALL'EZY-AS®

Indossate guanti in gomma con grip, per evitare di danneggiare la calza.

Appoggiate l'applicatore su una superficie sicura ad un'altezza confortevole.

Il foro oblungo dell'applicatore va rivolto verso di voi in posizione verticale.

Assicurandosi che la calza non sia alla rovescia, portatela all'interno dell'applicatore 3 in modo che il tallone della stessa sia dalla parte del foro oblungo (1).

Allargando la calza a livello dell'elastico in alto e senza farle fare grinze, appoggiatela al bordo superiore dell'EZY-AS® (2) e risvoltatela per farla scivolare lungo il lato esterno dello stesso (3).

L'operazione deve procedere fino a quando il tallone della calza giunga, nella sua zona centrale, al bordo superiore dell'EZY-AS®, in corrispondenza del foro oblungo (4).

A questo punto siete pronti per indossare o fare indossare la calza.






# COME INFILARE LA CALZA AD UN'ALTRA PERSONA

L'operazione richiede che il foro oblungo dell'applicatore vada a corrispondere con il lato del polpaccio di chi indosserà la calza. Si raccomanda che la persona stia seduta o coricata. Quando si applica una calza a punta aperta bisogna fare particolare presa sulla stessa attorno all'applicatore, per evitare che scivoli fuori posizione mentre si infila il piede. Fate infilare il piede nella punta della calza fino a far combaciare il tallone con quello della calza. Una volta che il tallone è ben posizionato, allentate la presa delle mani e cominciate a far risalire l'EZY-AS® lungo il piede e la gamba (A).

La calza così scivolerà lentamente lungo la parete dell'applicatore (B) per lasciarlo del tutto una volta giunti appena sotto il ginocchio, qualsiasi sia la lunghezza della calza. Ora è possibile sfilare l'applicatore. Nel caso di una referenza diversa dal gambaletto, sarete voi a sistemare il resto della calza, effettuando gli ultimi aggiustamenti di posizionamento secondo le istruzioni fornite dal fabbricante della stessa. Controllate che il tallone e la punta siano posizionati correttamente e che la calza sia alla giusta altezza e senza alcuna

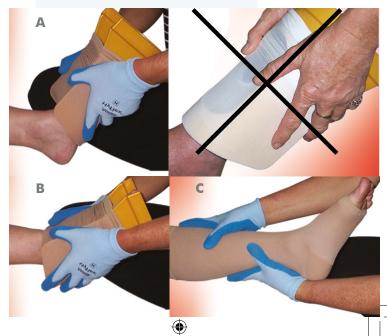





### COME INDOSSARE LA CALZA DA SOLI

Una volta applicata la calza sull'EZY-AS® sedetevi con le gambe incrociate e, lasciando l'EZY-AS® a terra o tenendolo in mano, infilate la punta del piede nella calza, bloccando con una mano il tallone della calza (5).

Fate scivolare il piede fino a far coincidere il vostro tallone con quello della calza (6). In questo modo il tallone scivolerà nel foro oblungo (7). Man mano che l'EZY-AS® viene fatto risalire, lungo il piede e la gamba, la calza lascia l'applicatore per aderire a voi (8).

Nel caso in cui si debba indossare una calza più lunga di un gambaletto, portate comunque l'EZY-AS® fino alla base del ginocchio e rimuovete la calza dall'applicatore che può così venire sfilato attraverso il piede.

Fate scivolare con le vostre mani il resto della calza fino a posizionarla correttamente sulla gamba

Può essere un valido aiuto l'accessorio MANIGLIE quando si svolge l'operazione da soli, soprattutto per coloro che hanno difficoltà a mantenere l'equilibrio o a raggiungere le proprie estremità (vedi paragrafo successivo).







#### INDOSSARE DA SOLI USANDO LE MANIGLIE

L'accessorio MANIGLIE non è obbligatorio, ma può essere molto utile.

Dopo aver applicato la calza all'EZY-AS®, inserite le 2 guide di plastica nera nel bordo inferiore in rilievo dell'EZY-AS®.

Una volta inserite le guide, appoggiate le maniglie a terra in modo tale da raccoglierle facilmente al momento di indossare la calza. Afferrate le maniglie e posizionate l'EZY-AS® orizzontalmente sul pavimento; infilate il piede dentro la calza e tirate lentamente aiutandovi con le maniglie (D).


Stendendo la gamba completamente e continuando a tirare lentamente le maniglie, il tallone sarà guidato nel foro oblungo (E) e si indosserà la calza come da descrizione nella precedente sezione.

In particolare, dopo che il tallone sarà entrato nel foro oblungo, è possibile piegare il ginocchio appoggiando l'applicatore e poi il piede sul pavimento.

Per fogliere le maniglie è necessario allargare con una mano la levetta che si trova nella faccia interna dell'applicatore e con l'altra spingere fuori la guida.

#### NOTA BENE:

L'accessorio maniglie si adatta a tutte e tre le misure dell'applicatore EZY-AS®.

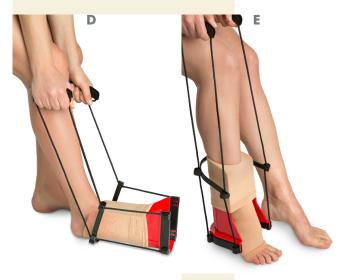



# COME APPLICARE BRACCIALI COMPRESSIVI

Indossate guanti in gomma con grip, per evitare di danneggiare il bracciale.

Appoggiate l'applicatore su una superficie sicura ad un'altezza confortevole.

Il foro oblungo dell'applicatore va rivolto verso di voi in posizione verticale.

Quando applicate il bracciale sull'EZY-AS® posizionate l'apertura per le dita e per il pollice verso il basso dell'applicatore (9). E' necessario fare attenzione a quale braccio indosserà il bracciale mantenere il senso secondo cui il palmo della mano dovrà combaciare con il foro oblungo (F mano destra) (G mano sinistra). Risvoltate l'estremità alta del bracciale sull'applicatore e stringetela nella parte curva (10), per evitare che scivoli quando l'altra mano verrà inserita nel bracciale stesso (11). Fate scivolare mano e braccio nel bracciale e continuate muovendo l'EZY-AS® verso l'alto (12). Può essere utile stringere il lembo del bracciale che tocca il palmo della mano (H), per evitare che il bracciale stesso si malposizioni sul braccio. Questo accorgimento si può applicare a bracciali



F



10



11



12



#### INFORMAZIONI SULLE MISURE



#### **APPLICATORE**

Colore	Misura	A e B	Codice
rosso	small	cm 28 - 35	SAS 08017
giallo	medium	cm 32 - 40	SAM 06264
blu	large	cm 38 - 47	SAL 06264

#### **MANIGLIE**

Colore	Misura	Circonferenza	Codice
nero	universale	/	UHA 07246

#### **PULIZIA**

Lavate l'applicatore EZY-AS® con acqua tiepida e detergenti delicati. Se è necessario disinfettare l'applicatore, lo si può pulire con una soluzione al 70% di alcool isopropilico (alcool bianco).

Non usate solventi e non esponetelo a sterilizzazione a vapore.

Non posizionatelo sotto la luce del sole diretta o vicino a fonti di calore.

Per maggiori informazioni consultate il nostro sito web: www.kamilamedical.com (video tutorial disponibile sul sito) mail: info@kamilamedical.com web: www.kamilamedical.com www.ca-mi.it Kamila è un marchio registrato da CA-MI srl



## **APPLICATORE**

PER CALZE E BRACCIALI MEDICALI

#### CE

Dispositivo medico di Classe I



Wellkang Ltd Suite B, 29 Harley Street LONDON, W1G 9QR, U.K. www.CE-Marking.EU Brevettato



EZY-AS® è un Marchio Registrato e Fabbricato in Australia da EZY-AS ABC Pty Ltd (ACN 159 252 856) www.ezyasabc.com

Kâmila è un marchio registrato da CA-MI srl

Distributore esclusivo per l'Italia: CA-MI srl tel. 0521 637 133 / fax 0521 639 041 email: info@kamilamedical.com www.ca-mi.it www.kamilamedical.com







